



# Cojín doble cuña

**SANITIFOAM®**  
CQFPREVENT

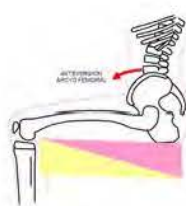

Anteversión

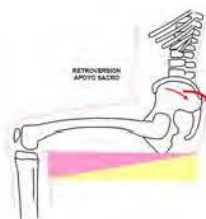

Retroversión



Basculaciones



**División Sanitaria**  
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330  
[www.cqfarma.com](http://www.cqfarma.com)

# SEMP SEDESTACION Y POSICIONAMIENTO

## Cojín Doble Cuña

Compuesto de una pieza de espuma de poliuretano y otra de espuma viscoelástica en forma de cuña, sus posiciones y posibles combinaciones son perfectas para un posicionamiento de retroversión o anteversión de pelvis, así como basculaciones a la izquierda o derecha.



### 1. ANTEVERSIÓN PÉLVICA:

Colocando la cuña de espuma de poliuretano en descenso hacia la parte de atrás, con la parte gruesa delante, conseguimos una acción de anteversión, siempre y cuando se mantenga apoyo en el respaldo con un ángulo de 90°.


La espuma viscoelástica de la parte superior se adapta a la forma del cuerpo repartiendo el peso de manera uniforme y disminuyendo las presiones, contribuyendo así a la prevención de u.p.p. mientras que la espuma de poliuretano apenas se deforma, manteniendo la anteversión.

### 2. RETROVERSIÓN PÉLVICA:

Colocando la cuña de espuma de poliuretano en aumento hacia la parte de detrás y dejando la parte gruesa de la viscoelástica debajo de las rodillas, se consigue una retroversión de la pelvis al ceder progresivamente la visco con la temperatura corporal y adaptándose cómodamente al usuario.

### 3. BASCULACIONES CORONALES DE PELVIS:

La colocación de las partes gruesas de las cuñas de espuma viscoelástica y de poliuretano hacia un lado u otro, conseguimos una basculación pélvica al lado izquierdo o derecho.

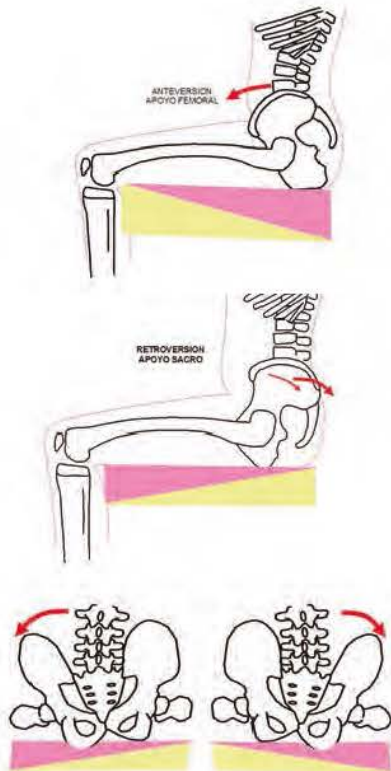

Fabricación por célula abierta



Densidad Visco Rosa



100% Libre de Latex



Densidad poliuretano

Composición	Viscoelástica	Poliuretano
Densidad	50 kg/m <sup>3</sup>	40 Kg/m <sup>3</sup>
Dureza	4 kPa	5,35kPa



## FUNDA ELÁSTICA

El cojín incluye una funda de tejido elástico, de color negro, impermeable a líquidos y parcialmente transpirable. Su cremallera en forma de U permite al usuario colocar con facilidad las dos cuñas, dependiendo de la finalidad buscada.

Además una pequeña solapa disminuye el posible filtro de líquidos al interior a través de la cremallera.

Medidas	Referencia
42 x 42 x 9 cm aprox.	CQF104BE



Funda elástica



Impermeable



Transpirable



Antiérgica



Desinfectable y esterilizable



Lavable



Comercial Quirúrgica Farmacéutica



Producto Sanitario Clase I no estéril (R.D. 1581/2009)